

Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2024-02-12

Provtagningsinstruktion

Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae *Mycoplasma genitalium*

Provtagningsmateriel: Aptima Hologic provtagningsset



Provtyp	Etikettfärg provset	Art. nr
Urin	Gul	24244
Vaginal	Orange	24245
Övriga sekret	Vit	24243

- Urine Specimen Collection Kit används till urinprov - **GUL etikett**
- Multitest Swab Specimen Collection Kit används till vaginal-, rektum- och svalgsekret - **ORANGE etikett**
- Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimens används till uretra-, cervix, svalg-, rektum- och konjunktivalsekret – **VIT etikett**

Vätskan i röret gör att provet håller sig längre. Vid spill på huden sköljs rikligt med vatten.

Om mer än ett prov tas ska varje provrör åtföljas av en egen remiss

Om prov för *Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae* och *Mycoplasma genitalium* tas vid samma provtagningsstillfälle krävs separat prov och separat remiss

Vaginalprov

För kvinnor rekommenderas vaginalprov. Endast urinprov på kvinnor har lägre känslighet än vaginalprov.


- Använd provtagningsset med ORANGE etikett.
- För in provtagningspinnen ca 3- 4 cm i vagina.
- Roter pinnen två varv utmed vaginalväggen. Ta ut pinnen.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Urinprov

Vid misstanke på urogenital infektion hos män, rekommenderas förstaportionsurin.

- Använd provtagningsset med GUL etikett.
- Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen.
- Samla upp första portionsurinen i lämpligt kärl eller mugg – c:a ¼ dL.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Överför med pipett som medföljer setet, ca 2 mL av urinprovet till transportröret.
- Kontrollera att vätskenivån efter tillsats av urin hamnar mellan pilarna på röret. Se bild.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.

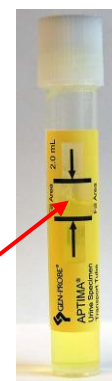

Svalgsekret

- Använd provtagningsset med ORANGE eller VIT etikett.
- Roter provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) mot tonsillerna och bakre svalgväggen. Se till att pressa pinnen mot tonsillerna och deras kryptor.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Rektumsekret

Provtagning sker med fördel via proktoskop.

- Använd provtagningsset med ORANGE eller VIT etikett.
- För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) ca 3-4 cm i rektum och rotera mot slemhinnan.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Uretraprov

- Använd provtagningsset med VIT etikett.
- Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen.
- För upp provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) ca 2 cm i uretra.
- Roterar pinnen 2-3 sekunder.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Cervixprov

- Använd provtagningsset med VIT etikett.
- Rengör portio med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med röd text).
- Släng tvättpinnen.
- För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) i cervixkanalen.
- Roterar pinnen.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.



Konjunktivalsekret

- Använd provtagningsset med VIT etikett.
- Avlägsna försiktigt pus och sekret i ögat med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med röd text).
- Stryk provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) kraftigt över insidan av det nedre ögonlocket.
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Sätt ned pinnen i röret och bryt av den vid skåran. Pinnen ska vara kvar i röret.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut.

