

## CHLAMYDIA TRACHOMATIS/ NEISSERIA GONORRHOEAE

### PROVTAGNINGSMATERIEL

#### APTIMA HOLOGIC:

- Urine Specimen Collection Kit. Används till urinprov - **GUL etikett**
- Multitest Swab Specimen Collection Kit. Används till vaginalsekret - **ORANGE etikett**
- Unisex Swab Specimen Collection Kit for Endocervical and Male Urethral Swab Specimens. Används till övriga sekret: uretra-, cervix, svalg-, rectum- och konjunktivalsekret - **VIT etikett**

Vätskan i röret gör att provet håller sig längre. Vid spill på huden sköljs rikligt med vatten.

### PROVTAGNING

#### Kvinnor

##### Vaginalprov (även självprovtagning):

- Använd provtagningsset med ORANGE etikett
- För in provtagningspinnen ca 3- 4 cm i vagina
- Roterar pinnen två varv utmed vaginalväggen. Ta ut pinnen.
- Skruva av korken utan att förstöra folien. Sätt ned pinnen i transportröret
- Bryt av pinnen vid skåran
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut



#### Urinprov


Endast urinprov på kvinnor har lägre känslighet än vaginalprov. Vaginalprov rekommenderas därför i första hand.

- Provet tas som nedan beskrivits för män

#### Män

##### Urinprov

- Använd provtagningsset med GUL etikett
- Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen
- Samla upp första portionsurinen i lämpligt kärl eller mugg – c:a ¼ dL
- Skruva av korken utan att förstöra folien.
- Överför med pipett som medföljer setet, ca 2 mL av urinprovet till transportröret
- Kontrollera att vätskenivån efter tillsats av urin hamnar mellan pilarna på röret. Se bild.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut

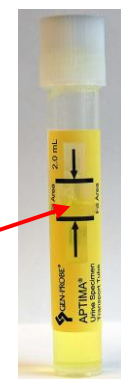

## Övriga sekret

### Uretraprov

- Använd provtagningsset med VIT etikett
- Patienten skall inte ha kissat under senaste timmen
- För upp provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) ca 2 cm i uretra
- Roter pinnen 2-3 sekunder
- Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret.
- Bryt av pinnen vid skåran.
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut



### Cervixprov:

- Använd provtagningsset med VIT etikett
- Rengör portio med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med röd text)
- Släng tvättpinnen
- För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) i cervixkanalen
- Roter pinnen.
- Skruva av korken utan att förstöra folien. Sätt ned pinnen i transportröret
- Bryt av pinnen vid skåran
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut

### Svalgsekret

- Använd provtagningsset med VIT etikett
- Roter provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) mot tonsillerna och bakre svalgväggen. Se till att pressa pinnen mot tonsillerna och deras kryptor.
- Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret
- Bryt av pinnen vid skåran
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut

### Rectumsekret

Provtagning sker med fördel via proktoskop.

- Använd provtagningsset med VIT etikett
- För in provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) ca 3-4 cm i rectum och rotera mot slemhinnan.
- Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret
- Bryt av pinnen vid skåran
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut

### **Konjunktivalsekret**

- Använd provtagningsset med VIT etikett
- Avlägsna försiktigt pus och sekret i ögat med tvättpinnen (vitt skaft i förpackning med röd text)
- Stryk provtagningspinnen (blått skaft i förpackning med grön text) kraftigt över insidan av det nedre ögonlocket.
- Skruva av korken utan att förstöra folien och sätt ned pinnen i transportröret
- Bryt av pinnen vid skåran
- Skruva på korken noggrant så att innehållet inte läcker ut