

Provtagning gynekologiska prover

ANMÄRKNINGAR

- Formalinet ska ej spädas ut med provtagningsvätska.
- Provmaterial som ligger i t ex natriumkloridlösning ska silas i polyesternät om det inte är större biopsier som lätt kan plockas över från lösningen till formalinburken.
- Undvik provmaterial på nätets utsida.
- Se till att nätet inte sticker ovanför formalinytan. Volym formalin ca 20 gånger provets volym.
- Olika provtyper separeras i egna formalinburkar, tex px i en burk och skrap i en annan burk.
- Fixera alltid vävnadspreparaten så fort som möjligt för bästa resultat.

UTFÖRANDE



Vik nätet till en "tratt", som ett kaffefilter.
Håll provmaterialet centrerat i "tratten".



För ihop nätet.



Vik ihop en gång till i mitten och vik ner övre delen av "tratten" för att försluta
och sätt på ett plastgem. Lägg ner nätet i formalinburk.